



Farmaconal

FICHA TECNICA INJERTOS

Nombre: INJERTOS

Los tejidos de Injertos se proveen en una variedad de unidades de tamaño estandarizados diseñadas para el uso quirúrgico por parte de profesionales de la salud calificados. Los huesos y tejidos blandos humanos procesados se han utilizado en diversas aplicaciones quirúrgicas y en combinación con prótesis. La cantidad y el tamaño del aloinjerto necesario para un procedimiento quirúrgico dependen de la preferencia individual del cirujano y del tamaño y tipo de defecto. La descripción del tejido, el número de serie, la fecha de vencimiento, el código de producto, el tamaño y la cantidad y la información adicional están impresos en la etiqueta del envase del aloinjerto.

Precauciones y advertencias:

Todos los aloinjertos son para uso en un único paciente. No utilice partes del aloinjerto de un envase en varios pacientes. No esterilice.

Puede haber presentes trazas de Gentamicina, Primaxina, Antibióticos de Anfotericina B, Penicilina G, Sulfato de Estreptomicina, Fosfato Sódico de Dexametasona, vitaminas y medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM):

Este Aloinjerto no debe utilizarse en ninguna de las siguientes condiciones:

- Si el precinto del envase está dañado o no está intacto
- Si el envase tiene algún tipo de daño físico
- Si el vacío dentro del frasco de vidrio no está intacto.
- Si el aloinjerto liofilizado se rehidrata durante más de 24 horas
- Si el aloinjerto congelado no se ha utilizado dentro de las 24 horas desde la descongelación o si se ha almacenado a temperaturas que superan las temperaturas de almacenamientos recomendadas.
- Si ya caduco la fecha de vencimiento indicada en el envase

Usarlo con precaución en la siguiente circunstancia:

- Fiebre
- Diabetes no controlada
- Embarazo
- Insuficiencia renal
- Hipercalcemia
- Enfermedad de Pott activa o antecedentes de ella
- Sepsis o infección en el sitio quirúrgico o alrededor de el
- Incapacidad para cooperar o comprender las instrucciones posoperatorias.



Farmaconal

FICHA TECNICA INJERTOS

Nombre: INJERTOS

Tipos de Aloinjertos:

- **Aloinjerto en CHIP de 15CC:** Este tipo de injerto es distribuido en partículas granuladas
- **Aloinjerto en CHIP de 30CC:** Este tipo de injerto es distribuido en partículas granuladas
- **Aloinjerto DBM de 1CC:** Este tipo de injerto es distribuido en pasta
- **Aloinjerto DBM de 3CC:** Este tipo de injerto es distribuido en pasta
- **Aloinjerto DBM de 5CC:** Este tipo de injerto es distribuido en pasta



Aloinjerto en Chip



Aloinjerto en Pasta (DBM)

Códigos de artículos

INJERTO EN CHIP DE 15cc

40003099 INJERTO UMTB HUESO CHIP 15CC R.1783
40003370 INJERTO -C- UMTB EN CHIP 15CC

INJERTO EN CHIP DE 30cc

40003163 INJERTO UMTB HUESO CHIP 30CC R.1843
40003371 INJERTO -C- UMTB EN CHIP 30CC

INJERTO EN DBM DE 1cc

40002777 INJERTO GRAFTON DBM PUTTY 1CC
40003537 INJERTO -C- DBM PASTA 1CC -RDP03

INJERTO EN DBM DE 3cc

40000013 ORTHOBLAST II 3CC
40003536 INJERTO -C- DBM PASTA 3CC -RDP04

INJERTO EN DBM DE 5cc

40000014 ORTHOBLAST II DBM 5CC REF-03-2110-0